

Schönes Wohnen - Leichteres Pflegen Mobiler bleiben - Mit technischen Hilfen



Gestatten: Vario, mein Name ist Vario 570.M3

Mein Name ist Programm!

Soviel wie ich kann, kannst Du dir gar nicht vorstellen.
Also pass mal auf, was jetzt alles kommt....

Mmh, ein
schickes rot

Komplimente
mag ich immer



Gestatten: Vela, mein Name ist Vela
Tango 700E Trippelstuhl.
Mit mir bleibst Du mobiler zuhause
und ich kann auch ganz viel!

*Du da oben: Ich wette mit Dir,
ich bin schneller als Du!*

Für nicht mehr mobile
Menschen - kostenlose
Vorführung zuhause
Infos: 0911-225217

VERWANDLUNGSMÖBEL
Neubauer
ERGONOMIE-KOMPETENZ-ZENTRUM
auf 3 Etagen
IGR
Geprüft
90402 Nürnberg · Lorenzer Straße 5 · Telefon 0911-22 52 17
Montag bis Freitag 10-18 Uhr · Samstag 10-14 Uhr
www.neubauer-kg.de · info@neubauer-kg.de

Vario 570.M3 - mein Name ist Programm

Schönes Wohnen - Leichteres Aufstehen / Pflegen

Mobiler bleiben mit technischen Hilfen



Jetzt zeige ich Dir meine einzigartigen Vorteile für meine Benutzer und Besitzer. Ich bin so vielseitig und kann mit soooo vielen Optionen ausgestattet werden, dass für fast jede/n was dabei ist um das Leben, das lange Sitzen oder das Pflegen angenehmer zu machen.



Stufenlagerung, Relaxposition, Sitzen und Aufstehen - angepasst an die Körpergröße

Vario steht für:

Pflege zuhause

Pflege im Heim

Pflege für Demenz Erkrankte

Pflege angepasst an Ihren Körper

Pflege mit Bewegung

Pflege extra klein ab Körpergröße 140cm

Pflege extra groß bis 220cm / 220 Kg

Medizinscher Einsatz: Dialyse, Onkologie, Demenz, Neurologische Einrichtungen, Dekubitusprophylaxe, spezielle Sitz- und Rückenlösungen und vieles mehr



Jeder Vario 570.M3 kann an die Körpergröße seines Benutzers / Besitzers angepasst werden.

Sitzhöhe
Sitztiefe
Armlehnehöhe
Sitzbreite
Rückenhöhe

VERWANDLUNGSMÖBEL
Neubauer

ERGONOMIE-KOMPETENZ-ZENTRUM

90402 Nürnberg · Lorenzer Straße 5 · Telefon 0911-22 52 17

Montag bis Freitag 10-18 Uhr · Samstag 10-14 Uhr

www.neubauer-kg.de · info@neubauer-kg.de

auf 3 Etagen

IGR
Geprüft



Sehr schön, dunkel gekleidet im eleganten pflegeleichten Bezug

Vario 570.M3 als Papagei. Hier in Ausführung Extra klein



Mehr Platz bis 75cm
Mehr Power bis 220 Kg
„Lass uns kuscheln“

Rückenhöhe von 72,
84, 94 und 104 cm
(Serie 84cm)

**Durchdachte
Lösungen
Damit vieles ein
bisschen besser geht**

ILP-Rücken bei Skoliose

Du willst gerade Sitzen und es geht
einfach nicht in „normalen“ Sesseln!

Kein Problem:

Mein Rücken lässt sich
Deinem Rücken anpassen

Stufenlos verstellbare seitliche Stützen
ermöglichen eine bessere Stabilität für
den Rücken. Damit der Sessel elegant
bleibt, machst Du die Polsterung mit
einem Klettverschluss einfach wieder zu



Mechanisch hinten links und rechts einstellbarer

ILP-Rücken mit Latexpolsterung.

Klettband lösen, Bezug hochklappen, Rücken mit den großen
Schrauben links und rechts einstellen,
Bezug runterklappen, Klettband befestigen - fertig....!

VERWANDLUNGSMÖBEL

Neubauer

ERGONOMIE-KOMPETENZ-ZENTRUM

90402 Nürnberg · Lorenzer Straße 5 · Telefon 0911-22 52 17

Montag bis Freitag 10-18 Uhr · Samstag 10-14 Uhr

www.neubauer-kg.de · info@neubauer-kg.de

auf 3 Etagen

IGR
Geprüft



**Mehr seitlicher Halt im Sessel
Mehr Stütze links und rechts**

**Kein Thema, das mach ich
(der Vario) gerne für Dich**



Schulter Pelotten



**Links: abklappbare Armlehne
für erleichterten Rollstuhltransfer
Wahlweise links, rechts, beidseitig
Wahlweise elektrisch oder von Hand**

Einsatzgebiete:

**Rheuma
Schlaganfall
Parkinson
COPD
Hemiplegie
Bandscheibenvorfall
Beinamputation
Kreuzschmerzen
Multiple Sklerose
Hüft- / Knie Arthrose
Neurologische Erkrankungen
Tagespflege
Dialyse
Kliniken
Unruhepatienten
Demenzerkrankungen
Geriatrische Schwäche
Und viele weitere....**



**Rechts: Arthrodesse Sitz
mit 2-geteiltem einstell-
barem Sitzpolster links
und rechts**



**Mehr Stütze im oberen Rücken bei Kyphose.
Vario 570 mit einstellbarem Kyphoserücken.
Für die geniale bequeme Abrundung sorgt ein
angepasstes Nackenkissen**

Fitformationen gibt es hier

VERWANDLUNGSMÖBEL
Neubauer

ERGONOMIE-KOMPETENZ-ZENTRUM

90402 Nürnberg · Lorenzer Straße 5 · Telefon 0911-22 52 17

Montag bis Freitag 10-18 Uhr · Samstag 10-14 Uhr

www.neubauer-kg.de · info@neubauer-kg.de

auf 3 Etagen

**IGR
Geprüft**

Drehen, rollen oder felsenfest...!



Drehen bis 175° links und rechts...zum Tisch, zum Besucher, zum Fenster - damit verrenkst Du Dir nicht mehr den Hals.


Links und rechts länger spielerisch drehen trainiert auch die Beckenbodenmuskulatur, was Inkontinenz entgegen wirkt (Tipp eines Ergotherapeuten).



Rollensystem mit automatischer Bremse und abnehmbaren Hebel hinten am Sessel.

Hebel nach unten drücken:
Sessel kann mit Person geschoben werden

Hebel loslassen:
Sessel bremst automatisch

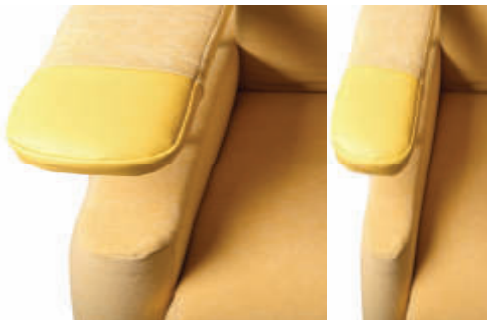

Die Armlehnen, so wie du es möchtest.

Armlehne ab 11 cm bis extra breit 17cm
Armlehne vorne optional mit Kunstleder bezogen

Die Armlehne ist serienmäßig höhenverstellbar von 19 bis 27 cm ab Sitzkante



Mitlaufende Armlehnen

nach hinten zur Liegeposition
Der Sessel wird dazu hinten unten angeschrägt


VERWANDLUNGSMÖBEL
Neubauer
ERGONOMIE-KOMPETENZ-ZENTRUM
auf 3 Etagen
IGR Geprüft
90402 Nürnberg · Lorenzer Straße 5 · Telefon 0911-22 52 17
Montag bis Freitag 10-18 Uhr · Samstag 10-14 Uhr
www.neubauer-kg.de · info@neubauer-kg.de

Die Armlehnen im medizinischen Bereich

Die Armlehnen können, wie der ganze Vario mit desinfizierbaren Stoffen bezogen werden.

Die Breite der Armlehne gibt es von 11 cm bis 17 cm.

Der Bezug der Armlehne kann vom Personal abgenommen und ausgetauscht werden

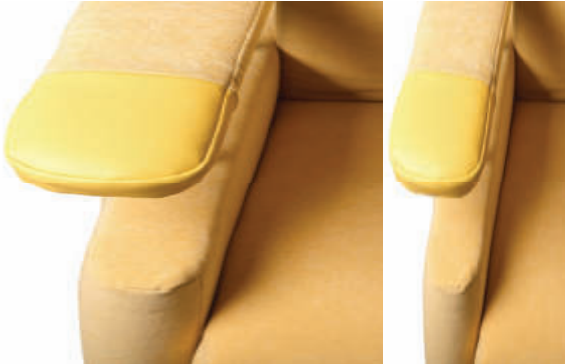

Spezialarmlehnen bei Hemiplegie
Spezialarmlehnen für Dialyseeinrichtungen

Höhenverstellbar, schwenkbar, desinfizierbar



**Unterhalb der höhenverstellbaren
Armlehnen sind auf jeder Seite 2
Metallstangen der Höhenverstellung.**

Diese sind ggf. auch als Fixierungspunkte einsetzbar

**Fitform - es kann nur
einen Besten geben**

Und damit alles noch bequemer ist...



Nackenrolle mit Gegengewicht, Reißverschluss und variabler Füllung aus Diolenwattkugeln. Im entsprechenden Bezug auch waschbar



Nackenkissen „Luxus“, mit Reißverschluss und wahlweise fester Formschaumfüllung oder variabler Füllung mit Diolenwattkugeln. Im entsprechenden Bezug auch waschbar



Nackenkissen Nr. 5 mit extra weichem Formschaum, Reißverschluss und Wendeschlaufe. Im Entsprechenden Bezug auch waschbar



Nackenkissen zur seitlichen Nackenstabilisation. Die Seiten links und rechts können nach innen gebogen werden um den Nackenbereich seitlich zu stabilisieren. Im entsprechenden Bezug auch waschbar.



Extra leichte Bedienung - farblich abgesetzt.

Weiß = Fußteilverstellung
Rot = Aufstehhilfe und Sitzschräge nach hinten (Stufenlagerung)

Blau = Rückenverstellung

Weiß unten: Sonderausstattung „Fitmotion“

Ich habe was gegen Rückenschmerzen

RCPM -
wie laufen, schwimmen, Fahrrad fahren,
aber im sitzen



Viele Erwachsene leiden gelegentlich unter Rückenschmerzen, wobei die stärksten Schmerzen im Sitzen auftreten. In Bewegung, wie beispielsweise beim Gehen oder Fahrrad fahren, sind die Beschwerden oft viel geringer.

Zu Hause sind Passivität im Sitzen und Vorteile für den Rücken durch Bewegung wesentlich schwieriger miteinander zu kombinieren. Fitform ist der erste in den Niederlanden, dem es gelungen ist, seine Sessel mit einer Technik auszustatten, die diese Kombination ermöglicht: RCPM.

Schmerzen vermindern

Durch die **RCPM-Bewegung** wird der Stoffwechsel in den Bandscheiben stimuliert. Da Ihre Wirbelsäule in Bewegung ist, werden Rückenschmerzen gemindert oder gar aufgelöst.

Auch Schwellungen der Füße und Unterschenkel - die durch langes Sitzen verursacht wurden - nehmen mit RCPM ab. Sie können herrlich entspannen und voller Energie wieder aufstehen.

Einschränkung: Bei Rückenschmerzen die durch Beckeninstabilität oder einem gebrochenen Wirbel verursacht werden, ist das RCPM-Sitzsystem nicht anzuraten.

RCPM ist die Abkürzung für „Rotary Continuous Passive Motion“ – ständig drehende, passive Bewegung.

Die Sitzfläche eines RCPM-Sessels macht drei- bis fünfmal pro Minute sanfte Drehbewegungen (0,8° nach rechts und nach links), während die Rückenlehne still steht.

RCPM sorgt in Kombination mit einer gut unterstützten Sitzhaltung dafür dass Rückenschmerzen die entstehen durch sitzen sich deutlich verringern.

Die rotierende Bewegung wird durch einen kleinen Elektromotor ausgeführt, der in der Sitzfläche eingebaut ist. Sobald Sie sich in den Sessel setzen, beginnt RCPM zu arbeiten: Ihre Wirbelsäule wird bewegt, die Bandscheibe positiv stimuliert. So können Sie sich wunderbar entspannen und mit neuer Energie wieder aufstehen

564 ZEN Pflegesessel: mehr Ruhe und Geborgenheit für Menschen mit Demenz, Parkinson und anderen Beschwerden



- Bequem sitzen
- eingestellt auf die Körpergröße
Sitzhöhe, Sitztiefe, Armlehnhöhe
 - eingestellt auf das Nutzerprofil A,B,C oder D
 - mit Rollen oder Drehscheibe
 - mit verschiedenen Sitzpolsterungen
 - mit verschiedenen Nackenkissen
 - viele verschiedene Bezüge
 - verstellbare aufpumpbare Lendenstütze
 - mit Fitmotion, dem einzigartigen Schaukelsystem



Der neue 564 ZEN Pflegesessel von Fitform, mit Aufstehfunktion, wurde speziell für Menschen mit Demenz oder einer anderen neurologischen Erkrankung (u. A. Parkinson, Multiple Sklerose, Muskelerkrankungen) entwickelt. 4 einstellbare Profile erleichtern die Nutzung und die Pflege besonders von Demenzerkrankten und Unruhepatienten.

Profil A	Profil B	Profil C	Profil D
Vollständig aus dem Sessel gehoben	Vollständig aus dem Sessel gehoben	Nur etwas angehoben	Nur etwas angehoben
Völlig nach hinten in die Liegeposition	Zur Entspannungsposition	Völlig nach hinten in die Liegeposition	Zur Entspannungsposition

564 ZEN Pflegesessel: mehr Ruhe für Menschen mit Demenz, Parkinson und anderen Beschwerden

Der 564 ZEN Pflegesessel mit elektrisch angetriebener Slow Motion Schaukelbewegung.

Der Benutzer des Stuhls fühlt sich weniger unruhig und entspannter. Dies hat einen positiven Einfluss auf Verhalten und Wohlbefinden.

Infolgedessen erleben professionelle Pflegedienstleister und informelle Pflegekräfte weniger Stress und ein Umfeld mit mehr Ruhe. Der 564 ZEN Pflegesessel ist mit einer elektrischen Verstellbewegung mit Aufstehhilfe, ausziehbarer Beinstütze, Neigungsverstellung und Rückenlehnenverstellung ausgestattet.

Mit verstellbarer Lordosenstütze und Kopfstütze 3-Tasten-Handsteuerbox Ausgestattet mit 3 Elektromotoren und 4 verschiedenen, leicht einstellbaren Nutzungsprofilen



Da war noch irgendwas Wichtiges mit dem genialen Fitmotion Schaukelsystem...

Personen mit psychischen oder neurologischen Störungen, zum Beispiel Demenz, fühlen sich oft unruhig und verhalten sich dementsprechend. Das ist besonders für die Person selbst nicht angenehm: es hat einen negativen Einfluss auf das Wohlbefinden. Darüber hinaus erfordert eine Person mit unruhigem Verhalten zusätzliche Anstrengungen und Aufmerksamkeit von informellen Betreuern (z. B. dem Partner) und/oder professionellen Betreuungskräften.

Der neue 564 ZEN Pflegesessel von Fitform, mit Aufstehfunktion, wurde speziell für Menschen mit Demenz oder einer anderen neurologischen Erkrankung (u. A. Parkinson, Multiple Sklerose, Muskelerkrankungen) entwickelt.

Ein wichtiges Merkmal des Sessels ist die Schaukelbewegung. Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass Schaukeln sich positiv auf unruhiges Verhalten auswirkt.

Nachweisbare positive Effekte

Der Entwicklung des 564 ZEN Pflegesessels ging ein sorgfältiger Forschungs- und Testprozess voraus. Das allgemeine Fazit lautet: Menschen, die einen ZEN Pflegesessel benutzen, fühlen sich weniger unruhig und sind entspannter. Dies hat einen positiven Einfluss auf ihr Verhalten und Wohlbefinden.

Darüber hinaus spricht für die Verwendung des 564 ZEN Pflegesessels:

- Reduzierte Belastung für Betreuer und Pflegekräfte (körperlich und geistig).
- Nachweisbare positive Wirkung bei Haut- und Gewebereizungen (Druckgeschwüren).
- Nachweisbare positive Wirkung auf Flüssigkeitsansammlung in den Beinen (Ödembildung).
- Schmerzmittel oder Beruhigungsmittel können bei einigen Patienten reduziert werden.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf

Der Fitform 564 ZEN Pflegesessel erfüllt alle Anforderungen an ein Medizinprodukt der Klasse 1 der EU MDR (Medical Device Regulation) 2017/745.

Zehn Vorteile für Klient und Betreuer

1. Der Klient fühlt sich wohler, weil er weniger Angst hat.
2. Nachgewiesene positive Wirkung auf Druckgeschwüre.
3. Nachgewiesene positive Wirkung auf die Ödembildung.
4. Schmerzmittel oder Beruhigungsmittel können bei einigen Patienten reduziert werden.
5. Die Pflegekraft wird körperlich und psychisch weniger belastet.
6. Sichere Anwendung durch vorprogrammierte und auf die Person abgestimmte Bewegungen.
7. Der Pfleger kann andere Aktivitäten ausführen, wenn jemand auf dem 564 ZEN Care-Stuhl liegt und schaukelt oder schläft.
8. Swing-Funktion mit zwei Geschwindigkeiten.
9. Optimale Sitzunterstützung, abgestimmt auf die Körpermaße des Benutzers.
10. Einfache und sichere Bedienung durch 3 Knöpfe.



Jetzt fällt es mir wieder ein.
Das geniale Fitmotion
Schaukelsystem ist für ALLE
Fitform Sessel erhältlich

Funktionen und Möglichkeiten

Der Fitform 564 ZEN Pflegesessel ist eine spezielle Version des Fitform 574 Vario Sessels. Die Hauptmerkmale des ZEN Pflegesessels sind:

- Slow-Motion-Schaukelbewegung; einstellbar auf zwei Geschwindigkeiten.
- Vier vorprogrammierte Benutzerprofile; dadurch richten sich die Sesselbewegungen sicher nach den Wünschen und Bedürfnissen des Benutzers.
- Einfache, benutzerfreundliche Handbedienung; drei Tasten mit deutlichen Abbildungen.
- Sichere Verriegelung; der Sessel lässt sich leicht ver- und entriegeln.
- Einstellbare Sitzunterstützung; der Sessel kann an die Körpermaße eines einzelnen Benutzers angepasst werden: Sitzhöhe, Sitztiefe, Armlehnenhöhe und Lendenstütze.

Ausprobieren? Jederzeit!

VERWANDLUNGSMÖBEL
Neubauer
ERGONOMIE-KOMPETENZ-ZENTRUM
auf 3 Etagen
IGR Geprüft
90402 Nürnberg · Lorenzer Straße 5 · Telefon 0911-22 52 17
Montag bis Freitag 10-18 Uhr · Samstag 10-14 Uhr
www.neubauer-kg.de · info@neubauer-kg.de

**Fitform ...
immer eine gute Referenz**



Seit Februar 2009 genießen die Patienten der onkologischen Ambulanz im St. Marien-Hospital in Düren einen besonderen Komfort.

In neu gestalteten Räumen, werden auf 14 Fitform-Sessel des Modells 560M3 Patienten mit den notwendigen Therapien (Chemo) versorgt.

Die leichte und gute Handhabung, die individuellen Verstellmöglichkeiten, der hohe Sitzkomfort sowie die Mobilität der Sessel erleichtern den Umgang mit den Schicksalen.

Ausstattung:

14 Fitform Sessel 560/570.M3

Bezug Niroxx (Inkontinenz)

Mobility Kit

Nackenkissen Nr. 6

Auch Wirtschaftlichkeit zählt:

Wo sonst 3 Betten stehen, können nun 6 Sessel aufgestellt werden

Die doppelte Anzahl von Patienten kann gleichzeitig behandelt werden



... einzigartig –
typisch Fitform !



„Ausführliche Vorführungen vor Ort in Kombination mit Patientenbefragungen und Testläufen sowie die Erfahrungswerte des erfahrenen Personals haben Fitform zur 1. Wahl der leitenden Ärztin Fr. Dr. Eichstaedt sowie der CTW Trägergesellschaft gemacht.“ – bekräftigt der ausführende Fitform Fachhändler

Weitere Entscheidungskriterien:

- Garantieleistungen
- individuelle Verstellmöglichkeiten
- Rückenfreundlichkeit
- Mobilität durch Rollensystem „Mobility-Kit“
- leichte Pflege (Niroxx – Inkontinenzbezug)
- nachträgliche Grössenverstellung ...

Gerne übersenden wir Ihnen noch weitere Referenzen von medizinischen Einrichtungen, welche sich für Fitform Sessel im Bereich der med. Anwendung & Pflege entschieden haben.

VERWANDLUNGSMÖBEL

Neubauer

ERGONOMIE-KOMPETENZ-ZENTRUM

90402 Nürnberg · Lorenzer Straße 5 · Telefon 0911-22 52 17

Montag bis Freitag 10-18 Uhr · Samstag 10-14 Uhr

www.neubauer-kg.de · info@neubauer-kg.de

auf 3 Etagen

IGR
Geprüft


Wie möchtest Du sitzen bzw. wie musst Du sitzen?



Standartsitz Formschaum mit 9 cm Höhe + Aufpolsterung. Die hochwertige Schaumstoffqualität sorgt für Formbeständigkeit und für lange Haltbarkeit



Weicher Sitz <90 Kg Körpergewicht. Latex und Formschaum - Hier wird die 9cm dicke Formschaumschicht durch eine Perfolatex R1 Sitzfläche oben ersetzt.

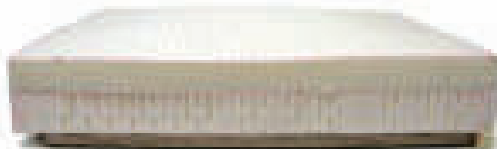

Weicher Sitz < 70 Kg Körpergewicht. 2 Latexschichten in unterschiedlicher Stärke und Festigkeit für leichte Persönlichkeiten und Menschen mit wenig „Sitzfleisch“



Festerer Sitz >70 Kg Körpergewicht. 2 Latexschichten in unterschiedlicher Stärke und Festigkeit für Menschen über 70 Kg bis ca. 100 Kg geeignet.



Anti-Dekubitus-Sitz fest von ca. 90-120 Kg Körpergewicht. Aufgebaut aus 4 cm Bultex Kaltschaum und oben 5 cm Memory-Schaum mit SG-Wert 100. Kann präventiv als AD-Sitzkissen verwendet werden



Anti-Dekubitus-Sitz weich von 50-70 Kg wahlweise mittelfest 70-90 Kg. Aufgebaut aus 4 cm Bultex Kaltschaum und oben 5 cm Memory-Schaum mit SG-Wert 60 bzw. 80. Kann präventiv als AD-Sitzkissen verwendet werden



Anti-Dekubitus-Sitz mit Intelli-Gel
Dieser Sitz besteht aus einem Kaltschaumrahmen und Intelli-Gel. Es kann bei Druckgeschwüren im Stadium EPUAP II eingesetzt werden. Es sollten nur dehnbare und geeignet Bezüge dafür ausgewählt werden.

Anti-Dekubitus und Positionierungskissen

Nur auf Anfrage: Luftkammersitz mit mehreren Luftkammern, Variabel aufpumpbar im 4-Kammer System

Du benötigst aus medizinischen Gründen einen eigenen Speziarsitz oder Schalensitz - auch kein Thema, jederzeit möglich.

Ich, der Vario, kann auch ohne Sitzpolsterung mit einer bezogenen Platte ohne Polsterung bestellt werden.

Auf dieser Platte wird Dein Speziarsitz oder Schalensitz bzw. so ähnlich angebracht. Geschraubt oder mit Klettband.



**Hier gibt's alles über mich
Hier kannst Du mich ausprobieren**

VERWANDLUNGSMÖBEL

Neubauer

ERGONOMIE-KOMPETENZ-ZENTRUM

auf 3 Etagen

IGR
Geprüft

90402 Nürnberg · Lorenzer Straße 5 · Telefon 0911-22 52 17
Montag bis Freitag 10-18 Uhr · Samstag 10-14 Uhr
www.neubauer-kg.de · info@neubauer-kg.de

Ausstattungen, welche noch angenehm sein könnten...!



Die Nackenstütze ist serienmäßig mechanisch von Hand verstellbar
Optional auch elektrisch



Das Inkontinenkissen ist wahlweise in Kunstleder und auch in Möbelstoff erhältlich. Nur waschbare Bezüge sind dafür geeignet.



Der Tisch am Sessel. Lesen, essen, schreiben, Getränk abstellen, Kreuzworträtsel lösen, Telefon griffbereit ablegen und vieles mehr. Wahlweise am Sessel befestigt und abnehmbar bzw. schwenkbar oder auch als eigenständiger Tisch mit Rollen. Höhenverstellbar, schwenkbar mit kleiner Ablage und verbreiterbar.



Die verlängerte Fußstütze. Da gibt es doch die Sitzzwerge, welche beim Aufstehen ihre wahre Größe erreichen. Die mit dem langen Fahrgestell. Für diese Menschen mit langen Beinen gibt es eine verlängerte Fußstütze, damit die Fußstütze bis zu den Fersen reicht.



USB-Ladegerät am Sessel. Moderne Zeiten - moderne Ausstattung. In der Seitentasche wird ein USB-Ladegerät untergebracht. Handy, Notrufgerät, Hörgerät - hier kannst Du alles im Sitzen laden!



Akku oder USV.

Wenn der Sessel mobil bleiben soll oder das Kabel eine Stolperfalle ist, dann ist ein Akku im Sessel empfehlenswert.

Der Akku macht ca. 300-350 Bewegungen.

Optional gibt es auch eine USV mit mehreren Steckplätzen zum überbrücken für den Notfall, falls die Sicherung raus springt oder der Strom ausfällt. Bitte beachten - das Kabel bleibt. Die USV macht ca. 30-40 Bewegungen - je nach Stärke und Gewicht des Benutzers



Topline Ausstattung für:

- 3 Motoren für Sitzschräge, Rücken, Fußteil, Aufstehhilfe
- Heizung in Sitz und Rücken
- elektrischer Nackenverstellung
- elektrisch verstellbare und aufpumpbare Lendenstütze (genial)
- 2 Memory Positionen
- Spritzwassergeschützte Handbedienung



0911-225217

VERWANDLUNGSMÖBEL

Neubauer

ERGONOMIE-KOMPETENZ-ZENTRUM

90402 Nürnberg · Lorenzer Straße 5 · Telefon 0911-22 52 17
Montag bis Freitag 10-18 Uhr · Samstag 10-14 Uhr
www.neubauer-kg.de · info@neubauer-kg.de

auf 3 Etagen

IGR
Geprüft

Im Sitzen „gehen“ im VELA Trippelstuhl

Auf dem Trippelstuhl mit Rollen können Sie sich im Sitzen mit den Füßen anschieben. So sparen Sie die Energie, die das Laufen kostet, für andere Aktivitäten.

Elektrische Höhenverstellung

Erreichen Sie hohe und tiefe Gegenstände, ohne sich anzustrengen. Zum Beispiel, wenn Sie den niedrigen Geschirrspüler aus- oder die oberen Schrankfächer einräumen.

Die verstellbare Sitzhöhe dient auch als Aufstieghilfe.



Besser atmen dank korrekter Haltung

Der ergonomische XXL-Bürostuhl hält Sie in einer aufrechten Sitzposition.

So gelangt mehr Luft in Ihre Lungen.

Dank der flexiblen Einstellungen passt Ihr Modell perfekt zu Ihrem Körper.

Garantiert sicher

Dank der Handbremse sitzen Sie immer sicher, während Sie zum Beispiel kochen oder die Wäsche machen. Die soliden Armlehnen bieten zusätzlichen Halt, wenn Sie aufstehen oder sich hinsetzen möchten.

Vela Tango 700E mit Sitzneigungsverstellung und Rückenverstellung



Vela ausprobieren - hier

VERWANDLUNGSMÖBEL
Neubauer
ERGONOMIE-KOMPETENZ-ZENTRUM

90402 Nürnberg · Lorenzer Straße 5 · Telefon 0911-22 52 17
Montag bis Freitag 10-18 Uhr · Samstag 10-14 Uhr
www.neubauer-kg.de · info@neubauer-kg.de

auf 3 Etagen

IGR
Geprüft

Im Sitzen „gehen“ im XXL - Büro Trippel Stuhl

Auf dem Trippelstuhl mit Rollen können Sie sich im Sitzen mit den Füßen anschieben.
So sparen Sie die Energie, die das Laufen kostet, für andere Aktivitäten.

Unsere Schwerlaststühle sind für Benutzer
von 140 kg bis zu 300 kg geeignet

Höhenverstellbare
faltbare
Armlehnen



Vela Tango 310 E
Bis 300 Kg
Sitzbreite 72 cm

Vela Tango 310 E
Bis 200 Kg
Sitzbreite 58 cm

Bremshebel



Auch mit elektrischer
Bremse lieferbar

Garantiert sicher stabil

Dank der wahlweise manuellen oder elektrischen Handbremse sitzen Sie immer sicher, während Sie zum Beispiel kochen oder die Wäsche machen oder arbeiten.

Die soliden Armlehnen bieten zusätzlichen Halt, wenn Sie aufstehen oder sich hinsetzen möchten.

Optional sind die Armlehnen auch abklappbar, höhenverstellbar, verbreiterbar

Glatter Boden?
Serienmäßig ist der Vela mit 2-Rad Bremse.
Bei glatten Boden ist auch eine Allradbremse lieferbar.

Probesitzen, aber gern

VERWANDLUNGSMÖBEL
Neubauer
ERGONOMIE-KOMPETENZ-ZENTRUM

auf 3 Etagen

IGR
Geprüft


90402 Nürnberg · Lorenzer Straße 5 · Telefon 0911-22 52 17
Montag bis Freitag 10-18 Uhr · Samstag 10-14 Uhr
www.neubauer-kg.de · info@neubauer-kg.de

Anwendungsbereiche für Vela Trippel-Stühle

Jedem Bedürfnis sein VELA-Trippelstuhl, egal ob schwer oder groß.
Wenn das Aufstehen und Laufen im Beruf schwer fällt und alles gut erreichbar sein soll, der Arbeitsplatz erhalten werden muss....



Im Büro mobil ohne Anstrengung

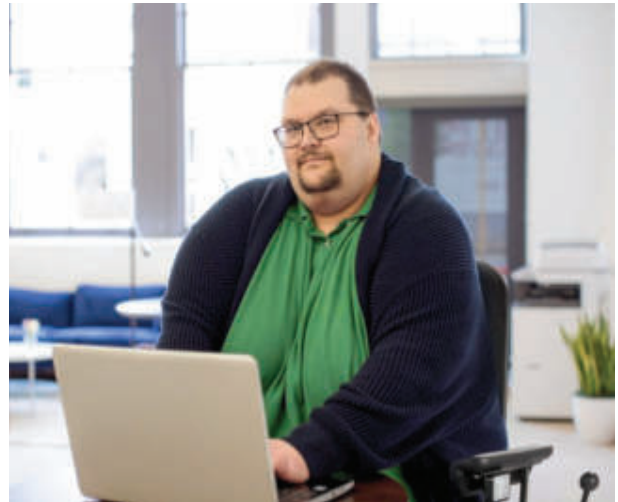

Arbeitsplatzerhalt / integrative Jobs

Bei integrativen Berufen / Jobs ist eine Zuzahlung durch die Rentenversicherung bzw. andere Institutionen möglich. Das sind jedoch alles Einzelfallentscheidungen, welche med. überprüft werden.

Falls Sie den VELA Trippelstuhl für Ihre Arbeit bzw. zum Erhalt Ihrer Arbeitskraft und Ihres Arbeitsplatzes benötigen, so bitten Sie Ihren Arzt um ein Attest und wir erstellen Ihnen das Angebot für den VELA Trippelstuhl zum Erhalt Ihres Arbeitsplatzes / Ihrer Arbeitskraft

Den Kostenvoranschlag reichen Sie dann bei Ihrem Sozialversicherungsträger / Rentenversicherung oder auch bei der BG zusammen mit dem Attest ein.



*Auf Deutsch: wenn Dein Chef Dich braucht,
dann frag einfach nach einen Vela Stuhl.*

Vela und mehr...

VERWANDLUNGSMÖBEL
Neubauer
ERGONOMIE-KOMPETENZ-ZENTRUM

90402 Nürnberg · Lorenzer Straße 5 · Telefon 0911-22 52 17
Montag bis Freitag 10-18 Uhr · Samstag 10-14 Uhr
www.neubauer-kg.de · info@neubauer-kg.de

auf 3 Etagen
IGR
Geprüft

Anwendungsbereiche für Trippel-Stühle

Jedem Bedürfnis sein VELA-Trippelstuhl, egal ob klein oder groß
Wenn das Aufstehen und Laufen am Arbeitsplatz, in Schule oder zuhause
schwer fällt und alles erreichbar sein muss!

Wahlweise elektrisch oder
mechanisch höhenverstellbar

*Der VELA Trippelstuhl hilft dir dort, wo
du ihn einsetzen kannst oder ihn benötigst*



Mit Schiebestangen
und Fußbügel



Mit Fußbrettchen
und Kontursitz



Wenn die oberen Fächer im Kleiderschrank
nur schwer erreichbar sind, aber Du deine
Klamotten unterbringen musst.

Dein Vela fährt
Dich hoch bis
77 cm



VERWANDLUNGSMÖBEL

Neubauer

ERGONOMIE-KOMPETENZ-ZENTRUM

auf 3 Etagen

IGR
Geprüft

Rund um den Vela

90402 Nürnberg · Lorenzer Straße 5 · Telefon 0911-22 52 17
Montag bis Freitag 10-18 Uhr · Samstag 10-14 Uhr
www.neubauer-kg.de · info@neubauer-kg.de

Anwendungsbereiche für Vela Trippel-Stühle

Wenn man/frau gerne kocht, alleine oder als Gemeinschaftserlebnis, aber die Kraft in den Beinen nicht mehr so da ist oder Schwindelgefühle kommen

...dann ist er für Dich da - der VELA Trippel-Stuhl

Er hilft Dir mobiler zu bleiben
Er erleichtert manche Wege im Alltag
Du bist unabhängiger zuhause
Und du hast es bestimmt verdient



VELA Trippelstühle - Bilder von den verschiedenen Anwendungen zuhause



Oben: Vela Stuhl mit Hüftgurt und separatem Handschalter.



Glatter Boden - kein Thema. Es gibt zur 2-Rad Bremse und 2- Fuß Antrieb auch optional eine Allradbremse

Serienmäßig ist die elektrische Höhenverstellung mit 2 Knöpfen in der rechten Armlehne

VERWANDLUNGSMÖBEL

Neubauer

ERGONOMIE-KOMPETENZ-ZENTRUM

90402 Nürnberg · Lorenzer Straße 5 · Telefon 0911-22 52 17
Montag bis Freitag 10-18 Uhr · Samstag 10-14 Uhr
www.neubauer-kg.de · info@neubauer-kg.de

auf 3 Etagen


IGR Geprüft

Anwendungsbereiche für Vela Trippel-Stühle

Ob bei der Pflege, bei mobilen Teilen der Hausarbeit oder auch in integrativen Jobs / Berufen, der VELA Trippelstuhl hilft dir dort, wo du ihn einsetzen kannst



Rheuma
Gleichgewichtsstörungen
Schlaganfall
Parkinson
Unsicher Gang
COPD
Hemiplegie
Bandscheibenvorfall
Beinamputation
Kreuzschmerzen
Multiple Sklerose
Sehbehinderung
Hüft- / Knie Arthrose

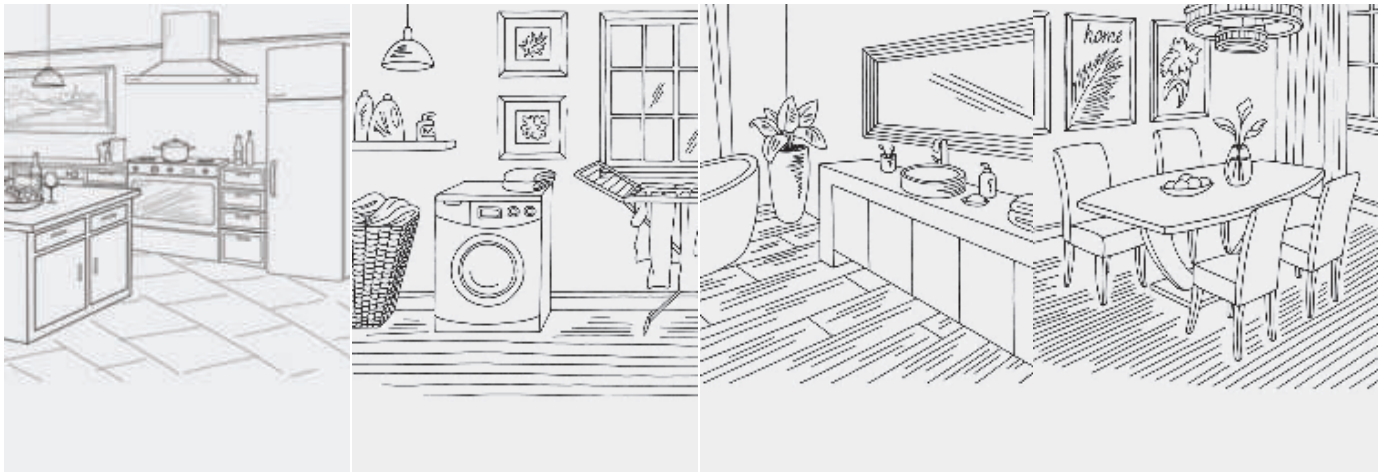

Viele Optionen und Extra lieferbar
Nackenstützen
Kontur- / Antidekubitussitz
Automatische Aufstehhilfe
Elektrische Sitzverstellung
Elektrische Rückenverstellung
Spezielle Sitzlösungen
Spezielle Rücken
Fußbretten / Fußstützen
Und vieles mehr

**Hier kannst Du
mich ausprobieren**

VERWANDLUNGSMÖBEL

Neubauer

ERGONOMIE-KOMPETENZ-ZENTRUM

90402 Nürnberg · Lorenzer Straße 5 · Telefon 0911-22 52 17
Montag bis Freitag 10-18 Uhr · Samstag 10-14 Uhr
www.neubauer-kg.de · info@neubauer-kg.de

auf 3 Etagen

IGR
Geprüft

Anwendungsbereiche für Vela Trippel-Stühle

Ob bei der Pflege, bei mobilen Teilen der Hausarbeit oder auch in integrativen Jobs / Berufen, der VELA Trippelstuhl hilft dir dort, wo du ihn einsetzen kannst



Herrlich, so ein
Schläfchen wenn
Oma gekocht hat



Aber nicht
mehr lange...

Verstellbarer Rücken

Mobiler im Haushalt

**Höhenverstellbare
faltbare
Armlehnen**

Was ich an meinem Vela
liebe: einfach alles,
locker, leicht und
abwaschbar



Abbildung: Vela Tango 700E im pflegeleichten Bezug Comfort blau mit Kippschutzbügel hinten und Allradbremse

Hier gibt's alles über mich,
Einfach anrufen oder mailen

VERWANDLUNGSMÖBEL
Neubauer
ERGONOMIE-KOMPETENZ-ZENTRUM
auf 3 Etagen
IGR Geprüft
90402 Nürnberg · Lorenzer Straße 5 · Telefon 0911-22 52 17
Montag bis Freitag 10-18 Uhr · Samstag 10-14 Uhr
www.neubauer-kg.de · info@neubauer-kg.de

Im Sitzen trainieren

im VELA Trippelstuhl

**Mein Vela Stuhl -
der geht auch
sportlich**

Mein Vela und sein Bike gegen:

- Mangelnde Durchblutung
- Inkontinenz
- Darmträgheit
- Geschwollene Beine
- Rückenschmerzen
- Muskelabbau
- Wer rastet, der rostet
- Und vieles mehr

Abbildung: Vela Tango 700E mit Kippschutzbügel
hinten und Allradbremse zusammen mit dem
Arm- & Beintrainer

Und jetzt erzählst Du
Deinen Freunden dass
Du Fahrrad fahren warst

So trainierst Du sicher und ergonomisch

Auf dem Vela Stuhl ist es möglich aufgrund seiner Radbremse und seiner Kippschutzstange zu trainieren. Diese beiden Sicherheitsmerkmale sorgen für zusätzliche Stabilität, sodass der Vela Stuhl auch bei starken Bewegungen nicht nach hinten kippen kann. Ein ergonomischer Stuhl mit verstellbarer Rückenlehne und komfortabler Polsterung, der dem Benutzer die optimalen Trainingsbedingungen bietet. Ohne zusätzliche Hilfe - Du entscheidest allein!

Einfach einen guten Platz für den kleinen Trainer daheim auswählen und wenn Dich die Lust zum trainieren überfällt, dann mit dem Vela Stuhl hintrippeln und loslegen. Genial ist es vor dem Fernseher und dabei ein Fahrradrennen anschauen oder gemütlicher vor dem Fenster.

Der Vela Stuhl lässt sich leicht an die optimale Position anpassen, damit Du sicher trainieren kannst. Optimale Sitzhöhe, eine Stütze im Rücken und eine einstellbare Sitzneigung sorgen für Dein Trainingserlebnis. **Die Bewegung wird Dich fordern und fördern. Du fühlst Dich besser!**

Hinweis: der Arm- & Beintrainer ist keines unserer Produkte. Es soll die vielseitige Anwendbarkeit eines Vela Stuhl weiter auf die sportliche Ebene und Gesundheitsförderung erweitern. Wir möchten, dass es unseren Kunden damit besser geht und sie Spaß haben. Wenn Du zu deinem neuen Vela Stuhl ein derartig heißes Trainingsgerät möchtest, dann helfen wir Dir gerne weiter.

**Vela Stuhl
Damit bleibst Du
mobiler und stabiler**

**Mobiler und sportlicher Du
so wieder werden kannst**

VERWANDLUNGSMÖBEL
Neubauer
ERGONOMIE-KOMPETENZ-ZENTRUM
90402 Nürnberg · Lorenzer Straße 5 · Telefon 0911-22 52 17
Montag bis Freitag 10-18 Uhr · Samstag 10-14 Uhr
www.neubauer-kg.de · info@neubauer-kg.de

auf 3 Etagen
IGR
Geprüft

Vela - noch mehr Sitze und Rücken



Mit geteilter ALP Rückenlehne,
separat verstellbar, wahlweise
niedrig oder hoch

Arthrodese Sitz mit vorne
geteilter Sitzfläche

Links: Fußbügel komplett
Rechts: einzelne Fußstützen
links und rechts



Serienhandschalter
unter der Armlehne



Sonderhandschalter
unter der Sitzfläche



Kippschutzbügel, empfohlen
bei sportlicher Nutzung
und schweren Personen



Support Rücken XL mit
Contour Sitzfläche



Sitzfläche und Rücken
nach Deinem Bedarf

VERWANDLUNGSMÖBEL
Neubauer
ERGONOMIE-KOMPETENZ-ZENTRUM

90402 Nürnberg · Lorenzer Straße 5 · Telefon 0911-22 52 17
Montag bis Freitag 10-18 Uhr · Samstag 10-14 Uhr
www.neubauer-kg.de · info@neubauer-kg.de

auf 3 Etagen

IGR
Geprüft

Es gibt noch viel mehr bei uns



VERWANDLUNGSMÖBEL
Neubauer
ERGONOMIE-KOMPETENZ-ZENTRUM

90402 Nürnberg · Lorenzer Straße 5 · Telefon 0911-22 52 17
Montag bis Freitag 10-18 Uhr · Samstag 10-14 Uhr
www.neubauer-kg.de · info@neubauer-kg.de

auf 3 Etagen
IGR
Geprüft

Notizen

Anfragen an info@neubauer-kg.de oder 0911-225217

Wir freuen uns auf Ihre Mail / Ihren Anruf

www.fitform-sessel.de

Fitform Vario 570.M3

Fitform ZEN

Optionen

Privat

Medizinisch

Vela Tango

www.vela-stuhl.de

Vela Heavy

Vela Sport



Uaah, Mist! Mit
einem Vela wäre mir
das nicht passiert

Haha, mit einem Fitform
habe ich sicheren Halt
beim Aufstehen



Für nicht mehr mobile
Menschen - kostenlose
Vorführung zuhause
Infos: 0911-225217

VERWANDLUNGSMÖBEL

neubauer
ERGONOMIE-KOMPETENZ-ZENTRUM

90402 Nürnberg · Lorenzer Straße 5 · Telefon 0911-22 52 17
Montag bis Freitag 10-18 Uhr · Samstag 10-14 Uhr
www.neubauer-kg.de · info@neubauer-kg.de

auf 3 Etagen
IGR
Geprüft